

## MATERIAL USADO NA FETOTOMIA

Fetótomo, fio de serra, jogo de cabos para puxar serra, gancho de olho, gancho articulado, guia para cordas.

## INDICAÇÕES

Os fetos absolutos ou relativamente grandes (especialmente morto) que não fazem tração forçada.  
Estreitamento do canal adequadamente dilatada duro e mole.  
Quando o feto é anormal estática e não pode ser corrigida.  
Quando deformidades fetais.

## CONTRA-INDICAÇÕES

Dilatação insuficiente.  
A condição geral do paciente é comprometida.  
A ruptura canal macio ou útero.

## BASICS

Não faça tarde demais.  
Só feto morto.  
Não cortar grandes partes.  
Ele deve ser feito com o animal de pé.  
Verifique antes de cortar, se o canal de nascimento não é afetado.  
Se a vida da mãe é, por vezes, comprometida, o sacrifício deve ser aconselhado.  
Use um monte de lubrificação.  
Coloque sempre primeiro o fetótomo depois a serra.

## CONDIÇÕES PARA O SUCESSO

Limpeza  
Decisão rápida.  
Trabalhando rápido (um plano de trabalho necessário).  
Muito lubrificante.  
Dê calmante ao animal.  
Coloque no lugar mãe adequada.  
Anestesia espinal.

## PROCEDIMENTO

1. Depois de localizar a mãe, verificando a posição fetal novamente.
2. Faça um plano de trabalho.
3. Conecte e fixe a parte que será cortada.
4. Também deve ser possível segurar a corda e um gancho, o partido, então, separar o corte.
5. Não corte as peças que são irrelevantes para resolver distocia.
6. Não corte muito grandes peças.
7. Se possível, cortar tecidos moles ou articulação.
8. Proteja o toque genital os instrumentos e as peças cortadas afiadas.
9. Sempre verifique o útero após a conclusão dos trabalhos.